




Criterios de evaluación

Todo lo que necesita saber para
evaluar los instrumentos quirúrgicos
durante un análisis de inventario

Limitación funcional

Acción

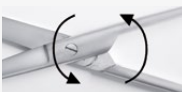

Reparar:
alinear

desafilado /
deformado



Reparar:
reafilear el filo

CT desgastado /
fragmentado



Sustituir

Corrosión

Corrosión por
rozamiento /
Corrosión
por contacto



Reparar:
tratamiento
de superficie

Corrosión
por picadura



Sustituir

Corrosión
superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie


Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura

en el pivote

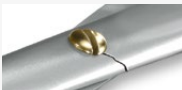

Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos




Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua

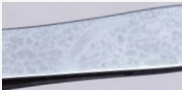

Reparar:
tratamiento
de superficie

Oro desgastado



Reparar:
tratamiento
de superficie



Cortar

Limitación funcional

desafilado /
deformado



Reparar:
reafilar la
parte funcional

Corrosión

Corrosión por
picadura



Sustituir

Corrosión
superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura

de la parte
funcional



Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua



Reparar:
tratamiento
de superficie



Cortar

Limitación funcional

Acción



Reparar:
alinear

Desalineación



Reparar:
alinear


Función
de trinquete



Reparar:
alinear

Corrosión

Corrosión
por rozamiento /
Corrosión por
contacto

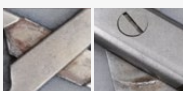

Reparar:
tratamiento
de superficie

Corrosión
por picadura



Sustituir

Corrosión
superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura

de la parte
funcional



Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua




Reparar:
tratamiento
de superficie

Desgastada,
azul (titanio)



Reparar:
recubrir

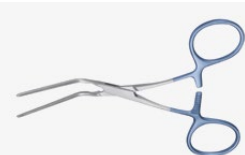

Sostener/sujetar

Limitación funcional

Acción



Reparar:
alinear

Desalineación



Reparar:
alinear

CT desgastado /
fragmentado




Reparar:
sustituir de
TC Lamina

Parte funcional
defectuosa



Sustituir


El trinquete
no funciona

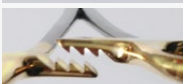

Reparar:
alinear

Corrosión

Corrosión por
rozamiento /
Corrosión por
contacto

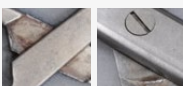

Reparar:
tratamiento
de superficie

Corrosión
por picadura



Sustituir

Corrosión
superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura


en el pivote



Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos

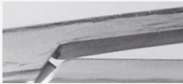

Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua



Reparar:
tratamiento
de superficie

Oro desgastado




Reparar:
recubrir
con oro



Sostener/sujetar

Limitación funcional

Púa doblada
(quirúrgica)

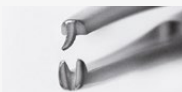

Sustituir

Presión del muelle



Reparar:
alinear

CT desgastado /
fragmentado



Sustituir

Corrosión

Corrosión
por picadura



Sustituir

Corrosión
superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura

de la parte
funcional



Sustituir


Daños generales en la superficie

Arañazos



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio

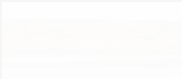

Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua



Reparar:
tratamiento
de superficie

Oro desgastado



Reparar:
recubrir
con oro



Sostener/sujetar

Limitación funcional

Forma



Reparar:
alinear

Tubo abollado



Sustituir

Accesorio suelto



Reparar:
enroscar un
nuevo accesorio

Corrosión

Corrosión
por picadura



Sustituir

Corrosión
superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura

Unión soldada



Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua



Reparar:
tratamiento
de superficie

Poros en las
uniones




Sustituir



Aspiración/Irrigación

Limitación funcional

Acción del manguito

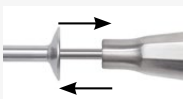

Reparar:
alinear


desafilado /
deformado



Reparar:
reafilar la
parte funcional

Corrosión

Corrosión por
picadura

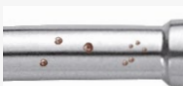

Sustituir

Corrosión
superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura

Manguito o trocar



Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua



Reparar:
tratamiento
de superficie

Poros en
las uniones



Sustituir



Aspiración/Irrigación

Limitación funcional

Acción



Reparar:
alinear

desafilado /
deformado



Reparar:
reafilear la
parte funcional

Muelle roto



Reparar:
insertar un
nuevo muelle

Trinquete



Reparar:
alinear

Curvatura
de la bisagra



Reparar:
alinear

Corrosión

Corrosión por
rozamiento /
Corrosión por
contacto



Reparar:
tratamiento
de superficie

Corrosión
por picadura



Sustituir

Corrosión
superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura

en la unión
articulada



Sustituir

en el trinquete /
pivote



Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua



Reparar:
tratamiento
de superficie



Separación

Limitación funcional

Deformación de la parte funcional



Reparar:
alinear

Parte funcional desafilada



Reparar:
reafilarse la parte funcional

Corrosión

Corrosión por picadura



Sustituir

Corrosión superficial



Reparar:
tratamiento de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento de superficie

Fractura

Valva doblada



Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos



Reparar:
tratamiento de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento de superficie

Manchas de agua



Reparar:
tratamiento de superficie

Poros en las uniones



Sustituir



Separación

Limitación funcional

Acción (dientes)



Sustituir

Accionamiento (deformación)



Reparar:
sustituir del
accionamiento

Corrosión

Corrosión por picadura



Sustituir

Corrosión superficial



Reparar:
tratamiento
de superficie

Superficie negra



Reparar:
tratamiento
de superficie

Fractura

Accionamiento / Soporte



Sustituir

Daños generales en la superficie

Arañazos



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de silicio



Reparar:
tratamiento
de superficie

Manchas de agua



Reparar:
tratamiento
de superficie

Poros en las uniones



Sustituir



Separación

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Una sociedad de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania

Casilla postal 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania

Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193

info@klsmartin.com · www.klsmartin.com